

## Einstufen-Peroxid System mit Platinkatalysator für alle Kontaktlinsen

Zum Reinigen, Desinfizieren, Neutralisieren und Aufbewahren aller Kontaktlinsen.  
Entfernt Proteine.



### Kraftvolle Reinigung und hohe Desinfektionswirkung

Tiefenreinigende Wirkung: löst Ablagerungen und Verunreinigungen und unterstützt die Proteinentfernung



### Frei von Konservierungsstoffen



Einfache Anwendung durch praktischen Behälter mit integriertem Platinkatalysator

Sicher, leistungsstark und komfortabel

## Anwendung

### 1. Hände waschen

Bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren, waschen Sie die Hände sorgfältig und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch ab.

### 2. Kontaktlinsen in Behälter legen

Öffnen Sie den Behälter und legen Sie die rechte und linke Linse in die entsprechende Halterung mit dem Buchstaben "R=weiß" bzw. „L=blau“.

### 3. Behälter befüllen

Füllen Sie den Behälter bis zur Markierungslinie mit der Peroxidlösung. Achten Sie darauf, dass der Behälter nicht zu wenig bzw. übermäßig befüllt wird und verschließen Sie ihn.

### 4. Desinfektion und Neutralisation

Die Kontaktlinsen müssen **mindestens 6 Stunden** oder über Nacht in der Lösung zur Desinfektion und Neutralisation aufbewahrt werden. Bewahren Sie den Behälter immer stehend auf. Nach der Neutralisation können die Kontaktlinsen wieder getragen werden.

### 5. Behälterpflege

Nach dem Aufsetzen der Kontaktlinsen schütten Sie die gebrauchte Lösung weg, spülen Sie den Behälter und die Linsenhalterung mit Peroxid- oder Kochsalzlösung ab und lassen Sie beides an der Luft trocknen.

#### **WICHTIG:**

Verwenden Sie immer den mitgelieferten Kontaktlinsenbehälter mit Platinkatalysator.