

DE - Sterile, benetzende, befeuchtende, antioxidierende und lichtschützende, isotonische, biokompatible, konservierte, gepufferte Augentropfen auf Basis von Hyaluronsäure, Lutein und Vitamin E TPGS. Besonders für trockene, dehydrierte und müde Augen geeignet. Kann auch in Kombination mit Kontaktlinsen angewendet werden, mit allen Arten von Kontaktlinsen kompatibel. **INDIKATIONEN:** **Sodyal® Lutein** benetzt und befeuchtet trockene, dehydrierte und müde Augen; verschafft Linderung bei juckenden Augen, Brennen, Fremdkörpergefühl; ideal bei nicht-traumatischen/nicht-pathologischen Veränderungen des Tränenfilms; ideal bei umweltbedingtem Augenstress (Sonneneinstrahlung, Wind, Staub, Klimaanlage, trockene und verschmutzte Luft, usw.); ideal bei visuellem Stress (längerer Gebrauch von Computern, ungünstige Lichtverhältnisse, Nachtfahrten usw.); geeignet bei der Behandlung und dem Schutz des Auges und der rezeptiven Strukturen vor oxidativem Stress durch Lichtquellen (Bildschirme elektronischer Geräte) oder Sonneneinstrahlung. **Sodyal® Lutein** eignet sich insbesondere zur Vorbeugung und Behandlung von Symptomen trockener Augen, die durch oxidativen Stress hervorgerufen werden; geeignet bei längerem Tragen von Kontaktlinsen; **Sodyal® Lutein** ist mit homöopathischen Behandlungen kompatibel. **GEBRAUCHSANWEISUNG:** Je nach Bedarf oder auf Anraten des Facharztes ein- oder mehrmals täglich oder auch über mehrere Tage ein bis zwei Tropfen auf das Auge tropfen. Für Kontaktlinsenträger: 2-3 Tropfen vor oder nach dem Einsetzen auf die Linse geben. Bei Bedarf den Vorgang mit eingesetzten Kontaktlinsen wiederholen, auch mehrmals täglich. Den geltenden Vorschriften entsprechend entsorgen. **WARNHINWEISE:** Bei Reizungen der Augen die Anwendung unterbrechen und einen Spezialisten aufsuchen; bei Allergien oder Überempfindlichkeit gegenüber den Produktbestandteilen nicht anwenden; von Wärmequellen fernhalten, trocken und bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C lagern; außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren; nicht schlucken; das Produkt nach dem Ablaufdatum nicht mehr anwenden; nach dem ersten Öffnen 90 Tage haltbar; steril bis zum ersten Öffnen; das Produkt nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt ist; den Tropfeinsatz nicht mit der Oberfläche der Augen in Kontakt bringen; die Flasche nach der Anwendung gut verschließen; zwischen der Anwendung dieses Produkts und anderer Produkte für die Augen sollten mindestens 5 Minuten liegen. **ZUSAMMENSETZUNG:** Hyaluronsäure, Lutein, Vitamin E TPGS, Dinatriumedetat, Natrium-N-hydroxymethylglycinat, gepufferte isotonische Lösung pH 7,2. **FREI VON:** Benzalkoniumchlorid, Chlorhexidin, Phenoxyethanol, Parabenen, Thiomersal und Komponenten tierischen Ursprungs.

FR - Gouttes oculaires stériles, lubrifiantes et photo-protectrices, isotoniques, bio-compatibles, préservées, tamponnées à base d'Acide hyaluronique, Lutéine et Vitamine E TPGS. Particulièrement indiquées pour les yeux secs, déshydratés et fatigués. Convient également pour une utilisation avec lentilles de contact portées, compatibles avec tous les types de lentilles de contact. **INDICATIONS:** **Sodyal® Lutein** lubrifie et hydrate les yeux secs, déshydratés et fatigués; soulage les yeux en cas de démangeaisons, brûlure, sensation de corps étranger; idéal en cas d'altérations non traumatiques/non pathologiques du film lacrymal; idéal en cas de stress oculaire environnemental (exposition au soleil, vent, poussières, air conditionné, air sec et air pollué, etc.); idéal en cas de stress visuel (utilisation prolongée de l'ordinateur, conditions défavorables d'éclairage, conduite nocturne, etc.); indiqué dans le traitement et la protection de l'œil, et des structures réceptives, du stress oxydatif dû à des expositions à des sources lumineuses (écrans des dispositifs électroniques) ou aux radiations solaires. En particulier, **Sodyal® Lutein** est utile pour la prévention et le traitement de la symptomatologie liée à la sécheresse oculaire induite par le stress oxydatif; indiqué en cas d'utilisation prolongée de lentilles de contact; **Sodyal® Lutein** est compatible avec les soins homéopathiques. **MODE D'EMPLOI:** Instiller une ou deux gouttes dans le bulbe oculaire une ou plusieurs fois par jour ou également pendant plusieurs jours, selon la nécessité ou l'avis du spécialiste. Pour les porteurs de lentilles de contact: instiller 2 à 3 gouttes sur la lentille avant ou après l'application. Si nécessaire, répéter l'opération avec lentilles de contact portées, également plusieurs fois par jour. Éliminer conformément aux normes en vigueur. **MISES EN GARDE:** En cas d'irritation oculaire, arrêter l'utilisation et contacter un spécialiste; ne pas utiliser en cas d'allergie et d'hypersensibilité aux composants du produit; conserver à l'abri de la chaleur, conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 5 et 35°C; tenir hors de la portée des enfants; ne pas avaler; ne pas utiliser le produit après la date d'expiration; utiliser dans les 90 jours suivant la première ouverture; stérile jusqu'à la première ouverture; ne pas utiliser le produit si le flacon semble endommagé; ne pas toucher la surface de l'œil avec le bec compte-gouttes; bien refermer le flacon après utilisation; administrer le produit au moins 5 minutes avant ou après l'administration d'autres produits topiques ophtalmiques. **COMPOSITION:** Acide hyaluronique, Lutéine, Vitamine E TPGS, Édétate disodique, N-Hydroxyméthylglycinate de Sodium, solution isotonique tamponnée à pH 7,2. **NE CONTIENT PAS:** Chlorure de benzalkonium, Chlorhexidine, Phénoxyéthanol, Parabènes, Thimérol et composants d'origine animale.

STERILE A



F696 Rev.03/01/25