



Parameterverfügbarkeit ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM

Basiskurve: **8,6** Durchmesser: **14,5** Material: **Senofilcon A** Packungsgröße: **6 Kontaktlinsen** Tragerhythmus: **2 Wochen oder 7 Tage / 6 Nächte**

Sphäre	0,00 dpt bis -6,00 dpt (in 0,25-dpt-Schritten)					-6,50 dpt bis -9,00 dpt (in 0,50-dpt-Schritten)					+0,25 dpt bis +6,00 dpt (in 0,25-dpt-Schritten)		
Achsen/Zylinder	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75	-0,75	-1,25	-1,75
10°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30°	✓	✓	✓			✓	✓						
40°	✓	✓	✓			✓	✓						
50°	✓	✓	✓			✓	✓						
60°	✓	✓	✓			✓	✓						
70°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
80°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
100°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
110°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
120°	✓	✓	✓			✓	✓						
130°	✓	✓	✓			✓	✓						
140°	✓	✓	✓			✓	✓						
150°	✓	✓	✓			✓	✓						
160°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
180°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sphärische ACUVUE® OASYS® sind von +8,00 dpt bis -12,00 dpt erhältlich.

Erfolgreich anpassen

Auswahl der Probelinsen
Werte entsprechen der Brillenrefraktion. Bei Werten ab +/- 4,00 dpt den HSA korrigieren. Wahl der Sphäre, des Zylinders und der Achse so nah wie möglich an den ermittelten Werten.

Die Kontaktlinse sitzt perfekt, wenn die Linse eine vollständige Abdeckung der Cornea zeigt, ausreichende Beweglichkeit für den Austausch der Tränenflüssigkeit (0,2–0,4 mm) besitzt und eine leichte Beweglichkeit beim „Push-up“-Test gegeben ist.

Konstante Inklination prüfen
Falls erforderlich, Verdrehung berücksichtigen

Verdrehung im Uhrzeigersinn
Verdrehungswinkel zur Refraktionsachse addieren

Verdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn
Verdrehungswinkel von der Refraktionsachse subtrahieren

Alle ACUVUE® Kontaktlinsen weisen einen Klasse 1 oder Klasse 2 UV-Schutz auf, der dazu beiträgt, die Hornhaut und das Augeninnere vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. UV absorbierende Kontaktlinsen sind KEIN Ersatz für UV absorbierende und schützende Sonnenbrillen, da sie das Auge und seine Umgebung nicht vollständig abdecken. UV- Transmission mit –1,00 Dioptrien Linse gemessen.

Wichtige Sicherheitsinformationen: Kontaktlinsen der Marke ACUVUE® dienen zur Korrektur des Sehvermögens. Wie bei allen Kontaktlinsen können Probleme mit den Augen, einschließlich Hornhautgeschwüren, auftreten. Bei manchen Kontaktlinsesträgern können leichte Reizungen, Jucken oder Unbehagen auftreten. Kontaktlinsen sollten nicht bei Augeninfektionen oder anderen Augenerkrankungen oder bei systemischen Erkrankungen, die das Auge beeinträchtigen können, verwendet werden. Vollständige Informationen, einschließlich Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen und Nebenwirkungen, entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung oder besuchen Sie unsere J&J-Website jvisioncare.de/at

ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM ist eine eingetragene Marke von Johnson & Johnson © Johnson & Johnson Medical GmbH / Johnson & Johnson Medical Products GmbH 2022 | PP2022A/VO4486

Johnson & Johnson VISION